
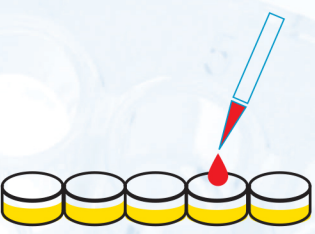


روش کار کیت AFP


- 25λ
نمونه-کنترل-کالیبراتور




1
- 100λ
کونژوگه




2
- ۶۰ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق

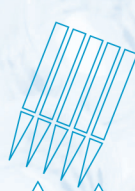


3
- پنج بار شستشو
هر بار 300 λ




4
- 100 λ
محلول رنگزا (A+B)

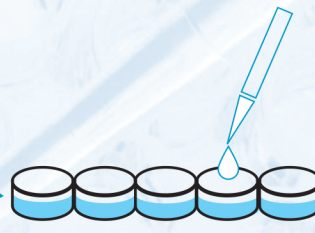


5
- ۱۵ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق و تاریکی



6
- 50λ
محلول Stop



7
- خوانش با فیلتر 450 nm
فیلتر فرانس 630 nm



8

Rev (02): 1399/03/20