

روش کار کیت FSH

50λ

نمونه-کنترل-کالیبراتور



1

100λ

کونژوگه



2

۶۰ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق

3

پنج بار شستشو
هر بار 300λ



4

100λ

محلول رنگزا (A+B)



5

۱۵ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق و تاریکی

6

50λ

محلول Stop



7

خوانش با فیلتر 450 nm
فیلتر رفراانس 630 nm



8

Rev (02): 1399/03/11