
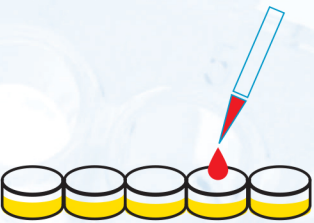


روش کار کیت Progesterone


- 25λ
نمونه-استاندارد




1
- 50λ
کونژوگه آنزیمی




2
- ۳۰ ثانیه حرکت آرام روی سطح میز




3
- 50λ
کونژوگه بیوتینی




4
- ۳۰ ثانیه حرکت آرام روی سطح میز

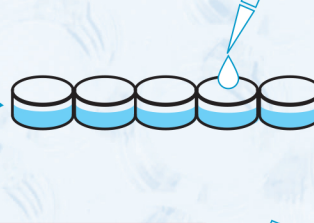

5
- ۶۰ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق

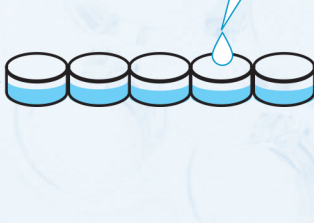

6
- پنج بار شستشو
هر بار 300λ

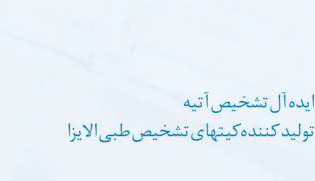

7
- 100λ
محلول رنگزا

8
- ۲۰ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق و تاریکی

9
- 50λ
محلول Stop

10
- ۴۵۰ فیلتر با فیلتر ۶۳۰

11