




روش کار کیت SARS-COV-2 IgG


- 10λ نمونه
+
1000λ محلول رقیق کننده نمونه

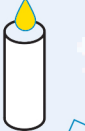



توجه: محلول های کنترل آماده مصرف می باشند.
- 100 λ
کنترل یا نمونه رقیق شده
(به جز چاهک های بلانک)

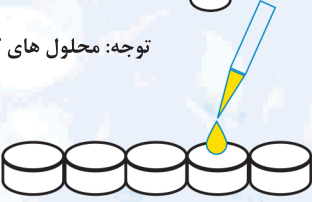

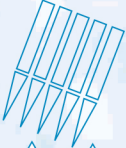- ۳۰ دقیقه انکوباسیون در دمای 37°C



- پنج بار شستشو
هر بار 300 λ

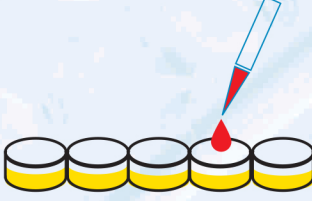

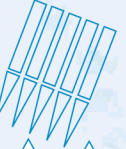- 100 λ
کنژوگه آنزیمی
(به جز چاهک های بلانک)



- ۳۰ دقیقه انکوباسیون در دمای 37°C

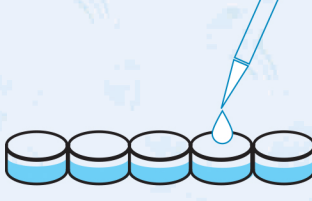
- پنج بار شستشو
هر بار 300 λ


- 100 λ
محلول رنگزا


- ۱۵ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق و تاریکی


- 100 λ
محلول Stop


- خوانش با فیلتر ۴۵۰
فیلتر دوم ۶۳۰

